

Klinisch Chemici : Dr. Ir. N. de Jonge Dr. E. Kusters Dr. G.A.E. Ponjee Dr. J. van de Ven Dr. R.J. Verheul Dr. R. Vicente	Ordersticker	Patiëntensticker
Lab. Loc Lijnbaan 088-9792269 Lab Loc. Burg. Banninglaan 088-9794679 Lab Trialcoördinator 088-9792950		

Verplicht in te vullen

Afdeling	Aanvrager	Contact	Afnamedatum	Afnametijd
METC	C. Jellema	Evelien Drost Locatie AMC T: 020-5664586 / Mobiel 06-38437975	-	-

Materiaal binnen 1 uur verwerken

SMS studie		Visite		Lab studienummer	Opmerkingen
13-043		☐ T0 dag 0 ☐ T1 dag 1 ☐ T2 dag 2 ☐ T3 dag 7 ☐ T4 3 maanden na ontslag		 / T ...	
Afnamebuis	Mengen	Stollen	Centrifugeren	Verwerking	Opslag/Verzenden
1 x 6,0 ml of 2x 2,7ml citraat	5x	n.v.t.	15 min bij 3000g	Plasma overpipetteren in de overschenkbuis. Centrifugeer hierna nogmaals 15 min bij 3000g. Pipetteer het plasma over in 3 micronics met blauwe dop. Niet dieper dan ¾ van het volume gebruiken. Gelabeld citraat + studienummer + afnamemoment.	In sealbag met dit formulier in vriezer -80 °C plaatsen
1 x serum buis 6,0 ml		30 min	10 min bij 2000g	Serum overpipetteren in 4 micronics met rode dop. Niet dieper dan ¾ van het volume gebruiken. Gelabeld citraat + studienummer + afnamemoment.	
1 x 4,5 ml heparine		n.v.t.	10 min bij 2000g	Plasma overpipetteren in 3 micronics met een groene dop. Niet dieper dan ¾ van het volume gebruiken. Gelabels citraat + studienummer + afnamemoment.	
1 x 4,0 ml edta		n.v.t.	10 min bij 2000g	Plasma overpipetteren in 3 micronics met een paarse dop. Niet dieper dan ¾ van het volume gebruiken. Gelabeld citraat + studienummer + afnamemoment.	
1 x paxgene buis 2,5 ml		n.v.t.	n.v.t.	Geen voorbereiding. Gelabeld citraat + studienummer + afnamemoment.	

Informatie voor het laboratorium. De patiënt komt met dit formulier en een afnamekit

Dit formulier apart invoeren, niet combineren met andere aanvragen. Deze SMS studie wordt als volgt in GLIMS gezet.

Type	Interne id	Identificatie	Code	Naam
Aanvrager: zrgv	54358	54358	?	Jellema K.

- Onder tabblad bepalingen wordt gekozen voor het formulier "Trialonderzoek"
- Hierop wordt aangevinkt - "SMS studie"
- Nu volgt een 1^{de} popup scherm, vermeld hierin het studienummer
- Nu volgt een 2^{ste} popup scherm, vermeld hierin de visite.
- Het formulier gaat met de verdeelbuisjes van de < - 70 °C in de sealbag in de vriezer.
- Na overpipetteren worden de verdeelbuisjes en de Paxgene buis met het formulier in een gesloten sealback in de vriezer - 80 °C vriezer geplaatst. Het formulier gaat met de verdeelbuisjes van de -80, in een sealbag in de vriezer. Geen patientensticker op de micronic of paxgene buis plakken