

## Instructieformulier Trials Klinisch Laboratorium OLVG West

Trial : SMS-substudie Specialisme : Neurologie  
Studiecode : S-TZH1 Trialonderzoeker : N Chekrouni AMC  
Trialcoördinator : KCL Tel : 8531

Patiëntgegevens: :

Aanvraagformulier etiket:

Afname : Dag 0

Datum :

Tijd :

Externe id :

Aanvraagverwerking :  
Aanvrager : J. Citroen  
Aanvragen : S-TZH1



### Materiaal:

1x	Citraat
1x	Stol
1x	Hep
1x	EDTA
1x	Paxgene

Afname door:

### Monsterverwerking:

### Opslag:

1x	Citraat	afdraaien plasma afpipetteren in middenbuis en nogmaals afdraaien, plasma in 3 micronic buisjes blauw
1x	Stol	afdraaien, serum in 3 micronic buisjes rood
1x	Hep	afdraaien plasma in 3 micronic buisjes groen
1x	EDTA	afdraaien plasma in 3 micronic buisjes paars
1x	Paxgene	ONBEWERKT

in VK08/TZH
in VK08/TZH
in VK08/TZH
in VK08/TZH
In VK07/TZH

Verwerkt door:

Gecontroleerd door:

Formulier in vakje Kwaliteit leggen(E3.19)

Paxgene buis na 24 uur in VK08 doen (Diana)

## Instructieformulier Trials Klinisch Laboratorium OLVG West

Trial : SMS-substudie Specialisme : Neurologie  
Studiecode : S-TZH1 Trialonderzoeker : N Chekrouni AMC  
Trialcoördinator : KCL Tel : 8531

Patiëntgegevens: :

Aanvraagformulier etiket:

Afname : Dag 1

Datum :

Tijd :

Externe id :

Aanvraagverwerking :  
Aanvrager : J. Citroen  
Aanvragen : S-TZH1



### Materiaal:

1x	Citraat
1x	Stol
1x	Hep
1x	EDTA
1x	Paxgene

Afname door:

### Monsterverwerking:

### Opslag:

1x	Citraat	afdraaien plasma afpipetteren in middenbuis en nogmaals afdraaien, plasma in 3 micronic buisjes blauw
1x	Stol	afdraaien, serum in 3 micronic buisjes rood
1x	Hep	afdraaien plasma in 3 micronic buisjes groen
1x	EDTA	afdraaien plasma in 3 micronic buisjes paars
1x	Paxgene	ONBEWERKT

in VK08/TZH
in VK08/TZH
in VK08/TZH
in VK08/TZH
In VK07/TZH

Verwerkt door:

Gecontroleerd door:

Formulier in vakje Kwaliteit leggen(E3.19)

Paxgene buis na 24 uur in VK08 doen (Diana)

## Instructieformulier Trials Klinisch Laboratorium OLVG West

Trial : SMS-substudie Specialisme : Neurologie  
Studiecode : S-TZH1 Trialonderzoeker : N Chekrouni AMC  
Trialcoördinator : KCL Tel : 8531

Patiëntgegevens: :

Aanvraagformulier etiket:

Afname : Dag 2

Datum :

Tijd :

Externe id :

Aanvraagverwerking :  
Aanvrager : J. Citroen  
Aanvragen : S-TZH1



### Materiaal:

1x Citraat  
1x Stol  
1x Hep  
1x EDTA  
1x Paxgene

Afname door:

### Monsterverwerking:

### Opslag:

1x Citraat	afdraaien plasma afpipetteren in middenbuis en nogmaals afdraaien, plasma in 3 micronic buisjes blauw
1x Stol	afdraaien, serum in 3 micronic buisjes rood
1x Hep	afdraaien plasma in 3 micronic buisjes groen
1x EDTA	afdraaien plasma in 3 micronic buisjes paars
1x Paxgene	ONBEWERKT

in VK08/TZH

in VK08/TZH

in VK08/TZH

in VK08/TZH

In VK07/TZH

Verwerkt door:

Gecontroleerd door:

Formulier in vakje Kwaliteit leggen(E3.19)

Paxgene buis na 24 uur in VK08 doen (Diana)

## Instructieformulier Trials Klinisch Laboratorium OLVG West

Trial : SMS-substudie Specialisme : Neurologie  
Studiecode : S-TZH1 Trialonderzoeker : N Chekrouni AMC  
Trialcoördinator : KCL Tel : 8531

Patiëntgegevens: :

Aanvraagformulier etiket:

Afname : Dag 7

Datum :

Tijd :

Externe id :

Aanvraagverwerking :  
Aanvrager : J. Citroen  
Aanvragen : S-TZH1



### Materiaal:

1x Citraat  
1x Stol  
1x Hep  
1x EDTA  
1x Paxgene

Afname door:

### Monsterverwerking:

### Opslag:

1x Citraat	afdraaien plasma afpipetteren in middenbuis en nogmaals afdraaien, plasma in 3 micronic buisjes blauw	<a href="#">in VK08/TZH</a>
1x Stol	afdraaien, serum in 3 micronic buisjes rood	<a href="#">in VK08/TZH</a>
1x Hep	afdraaien plasma in 3 micronic buisjes groen	<a href="#">in VK08/TZH</a>
1x EDTA	afdraaien plasma in 3 micronic buisjes paars	<a href="#">in VK08/TZH</a>
1x Paxgene	ONBEWERKT	In VK07/TZH

Verwerkt door:

Gecontroleerd door:

Formulier in vakje Kwaliteit leggen(E3.19)

Paxgene buis na 24 uur in VK08 doen (Diana)

## Instructieformulier Trials Klinisch Laboratorium OLVG West

Trial : SMS-substudie Specialisme : Neurologie  
Studiecode : S-TZH1 Trialonderzoeker : N Chekrouni AMC  
Trialcoördinator : KCL Tel : 8531

Patiëntgegevens: :

Aanvraagformulier etiket:

Afname : 3 maanden

Datum :

Tijd :

Externe id :

Aanvraagverwerking :  
Aanvrager : J. Citroen  
Aanvragen : S-TZH1



### Materiaal:

1x Citraat  
1x Stol  
1x Hep  
1x EDTA  
1x Paxgene

Afname door:

### Monsterverwerking:

### Opslag:

1x Citraat	afdraaien plasma afpipetteren in middenbuis en nogmaals afdraaien, plasma in 3 micronic buisjes blauw
1x Stol	afdraaien, serum in 3 micronic buisjes rood
1x Hep	afdraaien plasma in 3 micronic buisjes groen
1x EDTA	afdraaien plasma in 3 micronic buisjes paars
1x Paxgene	ONBEWERKT

in VK08/TZH

in VK08/TZH

in VK08/TZH

in VK08/TZH

In VK07/TZH

Verwerkt door:

Gecontroleerd door:

Formulier in vakje Kwaliteit leggen(E3.19)

Paxgene buis na 24 uur in VK08 doen (Diana)