

Naam studie/protocol: **SMS substudie MeninGene**

AMC: N. Chekrouni en T.M. van Soest
(arts-onderzoekers), 020-566 4586 of
06-38437975

LUMC: Nyika Kruij (neuroloog)



MeninGene SMS

Contactpersonen:

CRF nummer:

Patiëntgegevens:

Of patiënten etiket

Datum afname:

-

-

dd-mm-jj

Afnametijd:

;

uur ; min

Afnamemoment:

Dag 0 ☐

Dag 1 ☐

Dag 2 ☐

Dag 7 ☐

3 mnd ☐

▲ aankruisen wat van toepassing is

Materiaal:

☐ Stol; 1 x 5,0 mL

☐ Citraat; 1 x 6,0 mL

☐ Heparine; 1 x 4,5 mL

☐ EDTA; 1 x 4,0 mL

☐ Paxgene; 1 x 2,5 mL

▲ aankruisen wat er afgenomen is.

**Na afname: Verzenden naar afdeling Klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde LUMC,
Locatie E2-25 (verzenden op kamertemperatuur)**

Zie voor verdere instructies over de behandeling van het materiaal de protocollenmap bij de receptie en/of het protocollenlab.

▼ Informatie voor het laboratorium

Voor elk afnamemoment worden naast de 5 afnamebuizen, 12 reeds geëtiketteerde micronics meegeleverd met schroefdop met bijpassende kleur voor de serum (rode dop), citraat (licht blauwe dop), heparine (licht groene dop) en EDTA studiebus (paarse dop) (3 micronics per studiebus).

Verwerking:

Serum; 1 x 10,0 mL voor cytokines en complement components.

Laat de bus na afname 60 minuten uitstollen. Centrifugeer de bus 10 min. bij 2000g en kt. Breng het serum over in 3 micronics met rode dopkleur (circa 0.5 ml per micronic). Bewaar de micronics bij – 80 °C.

Citraat; 1 x 4,5 mL voor Coagulation/fibrinolysis factors

Centrifugeer de buis 10 min. bij 2000g en kt. Breng het plasma, binnen 30 min na centrifugeren, over in een tussenbuis. Centrifugeer het plasma een 2^{de} keer 5 min. bij 14.000g. Breng het plasma over in 3 micronics met licht blauwe dop (circa 0.5 ml per micronic). Bewaar de micronics bij – 80 °C.

Heparine; 1 x 10,0 mL voor complement components

Centrifugeer de buis 10 min. bij 2000g en kt. Verdeel het plasma over 3 micronics met licht groene dop (circa 0.5 ml per micronic). Bewaar de micronics bij – 80 °C.

EDTA; 1 x 4,0 mL voor cytokines

Centrifugeer de buis 10 min. bij 2000g en kt. Verdeel het plasma over 3 micronics met paarse dop (circa 0.5 ml per micronic). Bewaar de micronics -80 °C.

PAXgene; 1x 2,5 mL Sla de buis overnacht op bij – 20 °C. Sla de buis daarna op bij – 80°C.