

TRIALFORMULIER MeninGene studie		Order etiket:
BSN nummer: Naam patiënt: Geboortedatum M / V Subject Study ID:		Bloedafname door: Datum bloedafname: Tijdstip bloedafname: Afwerking monster door:
Aanvrager KWO	KWO 14-L-125 (dr. Schreuder, neurologie)	
EAcodes	EA 070046	
METC	14-L-125	
Visit :	☐ monstername1, dag 0 ☐ monstername 2, dag 1 ☐ monstername 3, dag 2 ☐ monstername 4, dag 7	

- ***Bloedafname Zuyderland Heerlen: IC of neurologie afdeling (Tiny Simons)***

Bloedafname:

- 1 x Stolbuis 5 ml (uit pakket) Cytokines en complement components**
- 1 x Citraat 6 ml (uit pakket) Coagulation**
- 1 x Heparine 4,5 ml (uit pakket) Complement components**
- 1 x EDTA 4 ml (uit pakket) Cytokines**
- 1 x PAXgene 2,5 ml (uit pakket) RNA**

Breng het afnamepakket met de afgenomen bloedbuizen samen met de verdeelbuizen en het trialformulier naar het klinisch chemisch lab en geef alles persoonlijk af aan de trialanalist of dienstdoende analist. Sein trialanalist 466180

Trialanalist:

1. Registreer in GLIMS de aanvrager: KWO 14-L-125
2. Registreer in GLIMS bij KCHH KWO's facturatie: KWO 10
3. Registreer bij 'waarde opmerking rapport' de visitenaam : monstername.., dag..

Verwerking:

Alle verdeelbuizen zijn meegeleverd, behoudens de tussenbuizen voor de verwerking van de citraatbuis. De verdeelbuizen hebben een gekleurde schroefdop passend bij het materiaal en zijn tevens voorzien van een vriessticker. Controleer of het CRF/subject study ID nummer, het type materiaal, en het afnamemoment op de sticker klopt.

Stolbuis: 5 ml (cytokines en complement components)

Laat de stolbuis 60 min rechtop staan. Centrifugeer de bus 10 min bij 2000g. Pipetteer het serum over in de 3 meegeleverde plastic verdeelbuisjes met rode schroefdop (0,5 ml per busje, uit pakket). Controleer of de sticker klopt met het materiaal en dopkleur. Vries het serum in bij -80°C.

Citraat: 6 ml (coagulation)

Centrifugeer de bus 10 min bij 2000g. Breng het plasma, binnen 30 min na centrifugeren, over in een tussenbuis (meerdere eppendorfcupjes, uit eigen voorraad). Centrifugeer het plasma een 2^e keer 5 min bij 14.000g (eppendorfcentrifuge). Breng het plasma over in 3 meegeleverde plastic busjes met lichtblauwe schroefdop (0,5 ml per busje, uit pakket). Controleer of de sticker klopt met het materiaal en dopkleur. Vries het plasma in bij -80°C.

Heparine: 4,5 ml (complement components)

Centrifugeer de bus 10 min bij 2000g. Breng het plasma over in 3 meegeleverde plastic busjes met lichtgroene schroefdop (0,5 ml per vial, uit pakket). . Controleer of de sticker klopt met het materiaal en de dopkleur. Vries het plasma in bij -80°C.

EDTA: 4 ml (cytokines)

Centrifugeer de bus 10 min bij 2000g. Breng het plasma over in 3 meegeleverde, plastic busjes met paarse schroefdop (0,5 ml per vial, uit pakket). Controleer of de sticker klopt met het materiaal en dopkleur.. Vries het plasma in bij -80°C.

PAXgene: 2,5 ml

Sla de bus overnacht op bij -20°C en daarna bij -80°C. De bus is reeds voorzien van een vriezersticker

Invriezen monsters (-80°C, vrieskast V3406, lade 3)

- 3 x serum
- 3 x citraat plasma
- 3 x heparine plasma
- 3 x EDTA plasma
- 1 x PAXgene bus (na overnachten bij -20°C)

Serotheek: -80°C V3406 lade 3

Rek.....nr

De ingevroren monsters worden op droogijs, op verzoek van de afdeling, door AMC Amsterdam opgehaald.

Bij vragen contact opnemen met de trialsectie Neurologie, tel. 66713.

TRIALFORMULIER MeninGene studie		Order etiket:
BSN nummer: Naam patiënt: Geboortedatum M / V Subject Study ID:		Bloedafname door: Datum bloedafname: Tijdstip bloedafname: Afwerking monster door:
Aanvrager KWO	KWO 14-L-125 (dr. Schreuder, neurologie)	
EAcodes	EA 070046	
METC	14-L-125	
Visit :	☐ monsternamen 5, 3 mnd	

- ***Bloedafname Zuyderland Heerlen: centrale post klinisch chemisch lab en hematologisch laboratorium, 2^e verdieping, route 2.15.***

Bloedafname:

- 1 x Stolbuis 5 ml (uit pakket) Cytokines en complement components**
- 1 x Citraat 6 ml (uit pakket) Coagulation**
- 1 x Heparine 4,5 ml (uit pakket) Complement components**
- 1 x EDTA 4 ml (uit pakket) Cytokines**
- 1 x PAXgene 2,5 ml (uit pakket) RNA**

Breng het afnamepakket met de afgenomen bloedbuizen samen met de verdeelbuizen en het trialformulier naar de trialanalist of dienstdoende analist. Sein trialanalist 466180

Trialanalist:

4. Registreer in GLIMS de aanvrager: KWO 14-L-125
5. Registreer in GLIMS bij KCHH KWO's facturatie: KWO 10
6. Registreer bij 'waarde opmerking rapport' de visitenaam : monstername.., dag..

Verwerking:

Alle verdeelbuizen zijn meegeleverd, behoudens de tussenbuizen voor de verwerking van de citraatbuis. De verdeelbuizen hebben een gekleurde schroefdop passend bij het materiaal en zijn tevens voorzien van een vriessticker. Controleer of het CRF/subject study ID nummer, het type materiaal, en het afnamemoment op de sticker klopt.

Stolbuis: 5 ml (cytokines en complement components)

Laat de stolbuis 60 min rechtop staan. Centrifugeer de bus 10 min bij 2000g. Pipetteer het serum over in de 3 meegeleverde plastic verdeelbuisjes met rode schroefdop (0,5 ml per busje, uit pakket). Controleer of de sticker klopt met het materiaal en dopkleur. Vries het serum in bij -80°C.

Citraat: 6 ml (coagulation)

Centrifugeer de bus 10 min bij 2000g. Breng het plasma, binnen 30 min na centrifugeren, over in een tussenbuis (meerdere eppendorfcupjes, uit eigen voorraad). Centrifugeer het plasma een 2^e keer 5 min bij 14.000g (eppendorfcentrifuge). Breng het plasma over in 3 meegeleverde plastic busjes met lichtblauwe schroefdop (0,5 ml per busje, uit pakket). Controleer of de sticker klopt met het materiaal en dopkleur. Vries het plasma in bij -80°C.

Heparine: 4,5 ml (complement components)

Centrifugeer de bus 10 min bij 2000g. Breng het plasma over in 3 meegeleverde plastic busjes met lichtgroene schroefdop (0,5 ml per vial, uit pakket). . Controleer of de sticker klopt met het materiaal en de dopkleur. Vries het plasma in bij -80°C.

EDTA: 4 ml (cytokines)

Centrifugeer de bus 10 min bij 2000g. Breng het plasma over in 3 meegeleverde, plastic busjes met paarse schroefdop (0,5 ml per vial, uit pakket). Controleer of de sticker klopt met het materiaal en dopkleur.. Vries het plasma in bij -80°C.

PAXgene: 2,5 ml

Sla de bus overnacht op bij -20°C en daarna bij -80°C. De bus is reeds voorzien van een vriezersticker

Invriezen monsters (-80°C, vrieskast V3406, lade 3)

- 3 x serum
- 3 x citraat plasma
- 3 x heparine plasma
- 3 x EDTA plasma
- 1 x PAXgene bus (na overnachten bij -20°C)

Serotheek: -80°C V3406 lade 3

Rek.....nr

De ingevroren monsters worden op droogijs, op verzoek van de afdeling, door AMC Amsterdam opgehaald.

Bij vragen contact opnemen met de trialsectie Neurologie, tel. 66713.